


Dräger DrugCheck® 3000 Drogennachweissystem

Mit dem Dräger DrugCheck® 3000 wissen Sie in kürzester Zeit, ob jemand in jüngster Zeit Drogen konsumiert hat und möglicherweise unter deren Einfluss steht. Der kompakte Drogenschnelltest auf Speichelbasis liefert Ihnen unkompliziert und kostengünstig hygienisch Testergebnisse. Das Gerät braucht keinen Strom und ist überall einsetzbar.

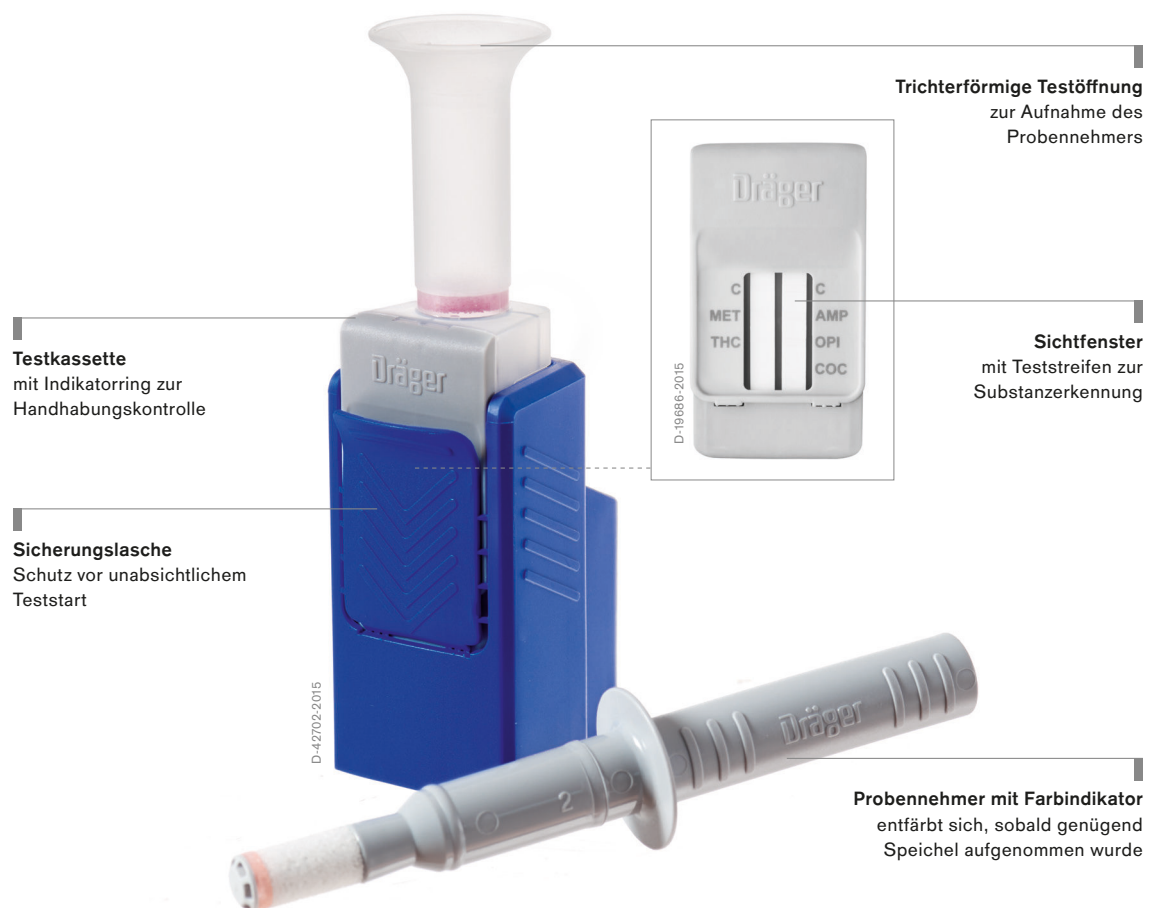

Produktvorteile

Einfache und sichere Probennahme

Der Dräger DrugCheck 3000 setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einem Probennehmer für das Sammeln einer Speichelprobe und einer Testkassette für die Analyse. Die Testkassette enthält die Pufferflüssigkeit und den Sichtbereich mit zwei Teststreifen, auf denen die Kontroll- und Testlinien erscheinen. Der Test erfolgt in drei einfachen Schritten: Speichelprobe sammeln, Test-Kit schütteln und nach kurzer Vorinkubationszeit den Test starten. Ein Farbindikator am Probennehmer entfärbt sich, sobald dieser ausreichend Speichel für einen Test aufgenommen hat.

Sobald die Kontrolllinien im Sichtbereich erscheinen, können Sie die Ergebnisse ablesen. Bei einem negativen Testergebnis erscheint eine Linie neben der jeweiligen Substanzklasse (Droge). Das bedeutet, dass in der Probe keine der gesuchten Substanzen detektiert worden ist. Erscheint keine Linie neben einer der Substanzklassen, ist das Ergebnis für diese Substanz positiv.

Schnelle und sensitive Auswertung

Mit dem DrugCheck 3000 testen Sie die Probanden auf fünf Substanzklassen gleichzeitig: Kokain, Opiate, Amphetamin, Methamphetamine/Designer Drogen (bspw. Ecstasy) und Cannabis (THC). Von den aufgeführten Substanzklassen ist Cannabis die am häufigsten konsumierte Droge mit dem am schwierigsten nachzuweisenden Wirkstoff (THC). Deshalb wurde der DrugCheck 3000 für die Detektion von THC optimiert und erlaubt nun zwei Messoptionen: Je nach gewählter Wartezeit (Vorinkubation) des Tests eine schnelle Messoption mit einem höheren, oder eine sensitive Messoption mit einem niedrigen THC Grenzwert. Der gesamte Test dauert lediglich 3 – 5 Minuten.

Klare Drogennachweise vor Ort

Dank seiner kompakten Bauweise im Hosentaschenformat lässt sich der DrugCheck 3000 leicht transportieren. Er ist schnell und unkompliziert einsatzbereit und eignet sich für den flexiblen Gebrauch in vielen Anwendungsbereichen wie bspw. Kontrollen im Straßenverkehr oder auch in sicherheitsrelevanten Arbeitsbereichen. Da das Test-Kit ohne elektrische Teile auskommt, können Sie es gefahrlos in explosionsgeschützten Bereichen verwenden.

Weitere Vorteile

Dräger verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Alkoholmesstechnik und Drogennachweisverfahren. Beim DrugCheck 3000 nutzt Dräger das Testprinzip des bewährten Systems Dräger DrugTest® 5000, das selbst kleinste THC-Mengen zuverlässig nachweist. Das Einweg-Test-Kit DrugCheck 3000 ist manipulationssicher und hygienisch in der Anwendung.

Verwandte Produkte



D-54720-2012

Dräger DrugTest® 5000

Kein Pipettieren, kein Tropfen, kein Zeitstoppen: Mit dem Dräger DrugTest® 5000 ist nicht nur die Probenahme einfach und schnell erledigt. Sie können die Probe danach auch sofort automatisch auswerten lassen – für ein zuverlässiges Ergebnis an Ort und Stelle.



D-6296-2009

Dräger SSK 5000

Das Dräger SSK 5000 dient zur Probenahme von Drogen-Anhaftungen von Oberflächen. In Kombination mit dem Dräger DrugTest 5000-System oder dem Dräger DrugCheck kann es zur Feststellung einer möglichen Drogen-Kontamination eingesetzt werden. Für weitere Untersuchungen kann die gewonnene Probe als Asservat gelagert und transportiert werden.



ST-13226-2007

Dräger DCD 5000

Rauschmitteln und Medikamenten einfach, schnell und sicher auf der Spur: Mit dem Dräger DCD 5000 können Sie die Speichelprobe nicht nur ganz leicht sammeln. Sie können sie damit auch lagern und zur Analyse ins Labor schicken – ohne dass die Probe unterwegs verfälscht wird.



D-4347-2014

Dräger SCK

Zur Dokumentation und Sicherstellung der Beweiskette nutzen Sie das Bestätigungsset mit Speichelprobennehmer zur nachträglichen Zweit-Probennahme für die Laboranalytik für eine Probe inklusive Versandmaterial.

Technische Daten

Test zum Nachweis von Drogen in Speichel

Abmessungen (B x H x T)	32 x 111 x 57 mm
Gewicht	< 30 g
Arbeitsbereich	Betrieb: 5 °C bis 40 °C bei 5 % – 95 % rel. Feuchte
Lagerung und Transport	4 °C bis 25 °C
Dauer einer Messung	schnelle Messung: Auswertung < 3 Minuten sensitive Messung: Auswertung < 5 Minuten
Wahl des Messmodus	Abhängig von der gewählten Vorinkubationszeit und dem gewünschten THC Cut-Off schnelle oder sensitivere Messung.
Zulassungen / Normen	Zulassung als Medizinprodukt innerhalb der EU nach Direktive 98/79/EG (IVDD). Außerhalb der Europäischen Union zur nicht-medizinischen (Non-IVD) Nutzung.

Bestellinformationen

DrugCheck® 3000	Beschreibung	Bestell-Nr.
Test zum Nachweis von Drogen im Speichel		
DrugCheck® 3000 STK 5-Panel	Packungseinheit 20 Stück	83 25 500
Folgende Substanzen lassen sich mit dem Dräger DrugCheck® 3000 nachweisen:		
<ul style="list-style-type: none"> – Kokain (COC) – Opiate (OPI) – Cannabis (THC) – Amphetamin (AMP) – Methamphetamine (MET) 		

Notizen

Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

